

Anleitung Mundschutz:

Benötigtes Material:

1. Atmungsdurchlässiger Baumwollstoff, z.B. Geschirrtuch, Bettlaken, T-Shirt ohne Elasthan etc.
2. Dünner, biegsamer Draht z.B. Bastel-, Garten-, Klemmdraht von Gefrierbeuteln. (Prüfung der Durchlässigkeit der Atmung: Tuch/ Stoff doppelt legen, dicht um Mund und Nase schließen)
3. (Optional): Je Maske zwei Streifen Schrägband aus Baumwollstoff, 90 cm lang, 2 cm breit.

Zuschneiden:





1. Eine 20 x 20 cm große Schablone aus Pappkarton zuschneiden. Auf dem Stoff platzieren und Stoff zuschneiden. (Stoff doppelt legen, dann geht es schneller.)

Kanten umnähen:



1. Untere Kante doppelt einklappen und feststecken.
2. In die obere Kante einen Basteldraht miteinklappen und feststecken.

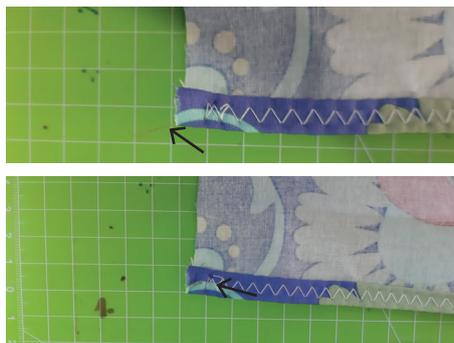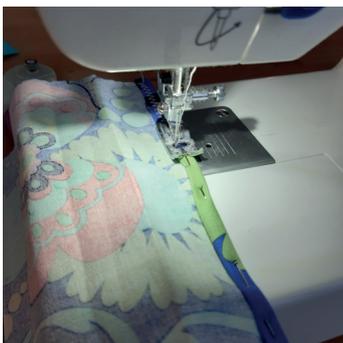

3. Abgesteckte Kanten umnähen.
4. Überstehenden Draht kürzen und doppelt umklappen, damit er nicht rausrutscht und später nicht kratzt.


Faltung:



1. Stoffquadrat auf die farbige Seite legen und in der Mitte falten und überbügeln.



2. Stoff wieder auffalten und auf unbedruckte Seite legen. Außenkanten Richtung Mittelfalz falten und umbügeln.

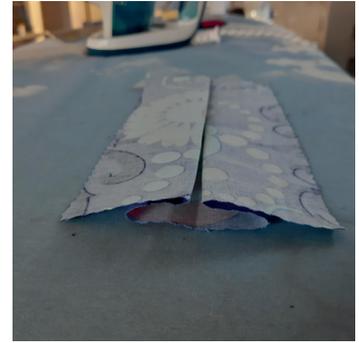


3. Stoff wieder aufklappen und wieder auf bedruckte Seite legen. Die zwei äußeren Falzen auf die Mittelfalz legen und überbügeln.

(Optional) Bänder nähen:



1. Aus Baumwollstoff zwei ca. 90cm lange und 4cm breite Streifen schneiden.
2. In der Mitte falten und überbügeln.

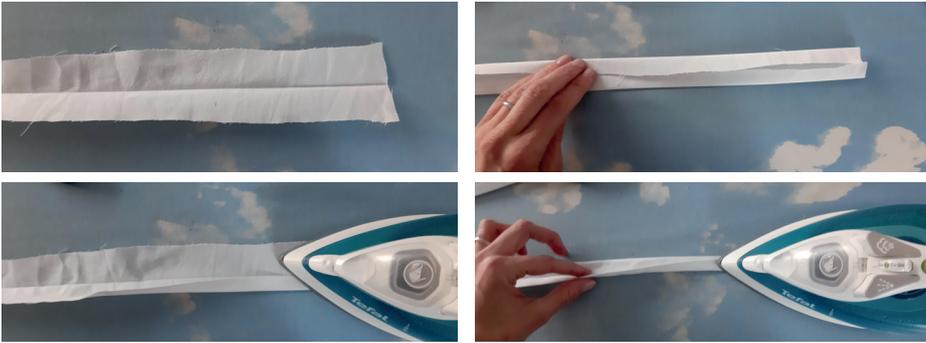

3. Aufklappen und beide äußeren Kanten zur Mitte falten und erneut bügeln.

Mundschutz zusammennähen:



1. Gefaltetes Mundstück in der Mitte des Schrägbandes bzw. des selbst genähten Bandesplatzieren, in die Faltung legen und feststecken.



2. Schrägband bzw. selbstgenähtes Band an Mundstück festnähen. (Die Faltung des selbst genähten Bandes muss über die gesamte Länge des Bandes genäht werden.)



Fertig!